

ŁÓŻKO KĄPIELOWE PACIFIC

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA



UWAGA!

Przed czyszczeniem

- odłączyć kabel zasilający
- zablokować kółka hamulcem

Podczas czyszczenia:

- nie używać do czyszczenia środków ściernych
- nie używać wody o temperaturze powyżej 50°C
- nie używać wody w nadmiarze
- nie używać myjek ciśnieniowych, tuneli myjących, sprayów pod ciśnieniem
- nie zanurzać w wodzie
- nie czyścić ani odtłuszczać stalowych osi mechanizmu
- używać wyłącznie zatwierdzonych produktów czyszczących. Jeśli niezbędny jest wybielacz stosować się ściśle do instrukcji używania wybielacza
- nie używać produktów na bazie oleju

WSZYSTKIE POWIERZCHNIE

Mycie:

- podnieść brzegi wanny na pełną wysokość (materiał jest naprężony)
- upewnić się, że wąż spustowy jest podłączony do odpływu
- spłukać całą powierzchnię świeżą ciepłą wodą (poniżej 50°C)
- wytrzeć całość gąbką lub miękką tkaniną zmoconą ciepłą wodą zawierającą mydło lub łagodny detergent

Suszenie:

- pozostawić brzegi uniesione by woda spłynęła
- wytrzeć do sucha czystą, miękką tkaniną lub gąbką
- opuścić brzegi wanny po suszeniu

Dezynfekcja:

- umyć powierzchnię
- wytrzeć miękką tkaniną lub gąbką zwilżoną zatwierdzonym środkiem czyszczącym
- wytrzeć pozostałość wodą używając miękkiej tkaniny lub gąbki
- wysuszyć

CZYSZCZENIE WYBIELACZEM

Jeżeli żaden z zatwierdzonych środków czyszczących nie dezynfekuje w stopniu wystarczającym należy użyć 5.25% roztwór Podchlorynu Sodu rozcieńczonego do mniej niż 1 część wybielacza na 100 części wody. Środki wybielające powodują korozję i naturalną degradację – mogą powodować uszkodzenia. Jeśli użyto wybielacza do czyszczenia należy starannie wypłukać i wysuszyć jego pozostałości.

UWAGA

tapicerka wanny wykonana jest z elastycznego włókna z poliuretanowym pokryciem, pozostałości mydła mogą niszczyć powierzchnię.

Nie stosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować utratę gwarancji